


DP 3.5 CZ Dokumentace procesů

Softwarová aplikace

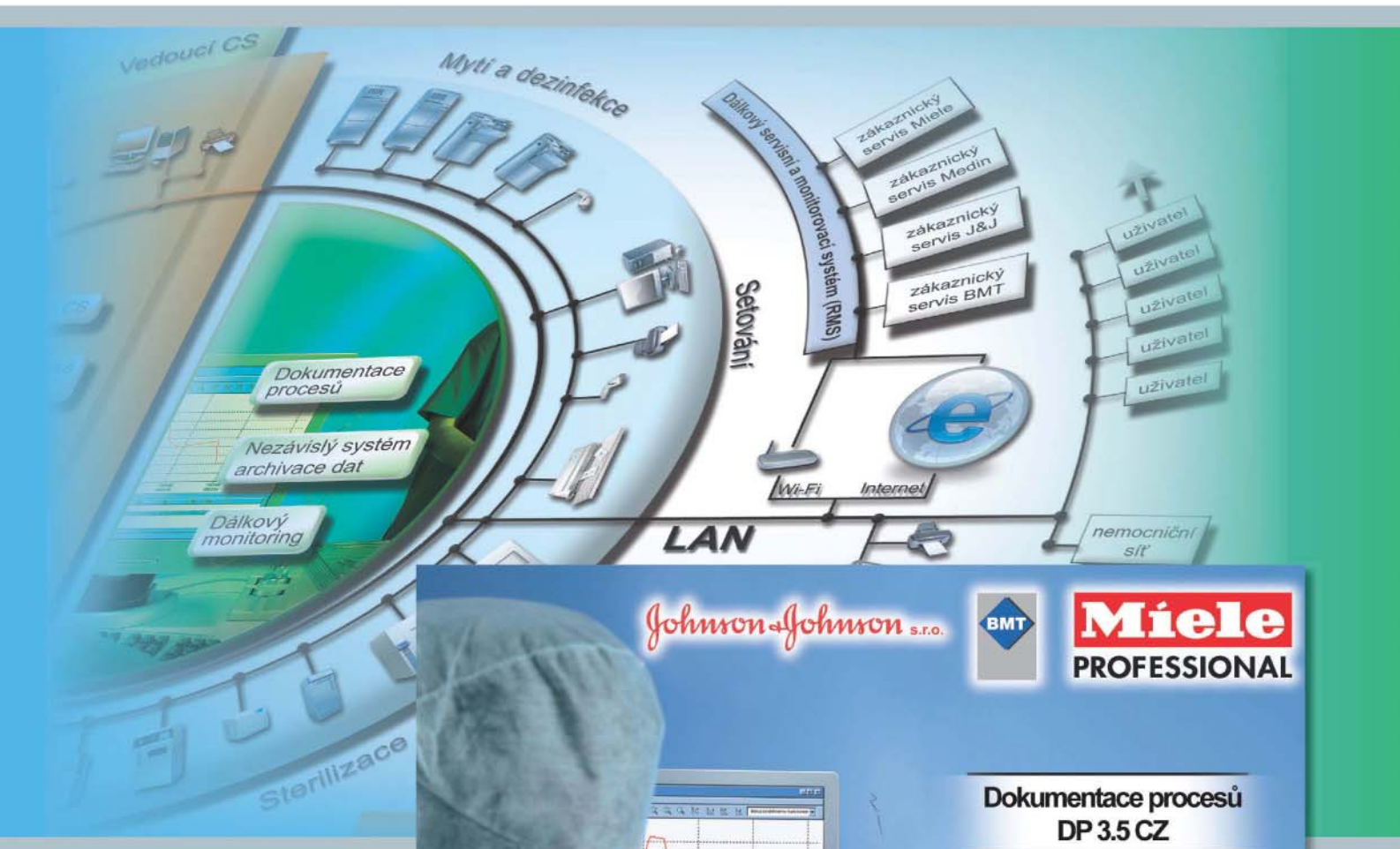

... vše pod kontrolou

Dokumentace procesů DP 3.5 CZ

Softwarová aplikace "DP 3.5 CZ"

tvorí nedílnou součást jednotného informačního systému společností BMT, Miele, Medin a Johnson&Johnson. Tyto společnosti již více než deset let navzájem spolupracují a z této spolupráce vznikl systém propojení jednotlivých přístrojů na sterilizačním pracovišti do jednoho funkčního celku. Náš informační systém umožňuje modifikaci dle individuálních požadavků zákazníka a možnost napojení na jakýkoliv další nadstavbový informační systém ve zdravotnických zařízeních. Jednotný informační systém vám zajistí maximální transparentnost, zpětnou dohledatelnost procesů a zvýší efektivnost hospodaření s materiálem.

Softwarová aplikace "DP 3.5 CZ"

spolu s propojením přístrojů na sterilizačním pracovišti do počítačové sítě (LAN), umožňuje dokumentovat veškeré procesy přípravy sterilního materiálu od mytí, přes sterilizaci, až po použití na operačních sálech. Tento softwarový produkt zajišťuje dokumentaci procesů, nezávislou archivaci dat a dálkový monitoring přístrojů (RMS) firemním servisem. Převážnou většinu funkcí této aplikace lze využít i tam, kde není k dispozici počítačová síť. Pak postačuje pouze propojení přístrojové techniky do jednoho počítače (např. vedoucího sterilizace), kde je nainstalovaná příslušná aplikace "DP 3.5 CZ".

Co Vám tento produkt přináší?

- ON-LINE internetová diagnostika včetně kontroly provozních stavů připojených zařízení
- Dálkové monitorování přístrojů (RMS), které zajišťuje rychlou a optimální reakci servisu
- Nezávislý systém archivace dat (požadavek legislativy)
- Zobrazení dokumentace procesů právě probíhajícího cyklu v reálném čase
- Archivaci a zpětné vyhledávání dokumentace procesů včetně tisku kompletních protokolů i s grafickým průběhem cyklů připojených zařízení



Datum	Program	Stav	Arnes	Ukrytí	Stav	Stav
30.8.2005	PT - Vakuum test	14:18	14:35	010.04	00004	Bez zmeš
30.8.2005	PT - Sterilizační test	14:38	14:55	010.04	00004	Bez zmeš
30.8.2005	PT - Návratový test	14:58	15:02	014.32	00008	Bez zmeš
30.8.2005	PT - Sterilizační test	15:03	15:04	014.32	00008	Bez zmeš
30.8.2005	PT - Sterilizační test	15:10	15:10	1:00.00	00008	Bez zmeš
30.8.2005	PT - Sterilizační test	17:30	18:00	014.32	00008	Bez zmeš
30.8.2005	PT - Vakuum test	18:00	18:17	011.00	00004	Bez zmeš
30.8.2005	PT - Sterilizační test	18:20	18:30	010.04	00004	Bez zmeš
30.8.2005	PT - Návratový test	18:40	18:50	014.32	00004	Bez zmeš

UNISTERI 336 040928

PC-Internál
10A: 4927.91
Marti: 11.40 10.01.2005
Internál: 00

400 PPKPa 1. 100 P
100 104 10°C 1. 00

End of Evaluation 1
Time: 11:50
pmax = 13.0 kPa
pmin = 9.9 kPa

End of Evaluation 2
Time: 11:57
pmax = 10.3 kPa
pmin = 10.3 kPa

End of Evaluation 3
Time: 12:40
pmax = 10.0 kPa
pmin = 10.0 kPa

End of Evaluation 4
Time: 12:10
pmax = 10.0 kPa
pmin = 10.0 kPa

Begin of Heating
Time: 12:17
pmax = 170.6 kPa

Sterilization Begin
Time: 12:19
p = 216.1 kPa
p1 = 216.2 kPa
T = 120.1 °C

Sterilization End
Time: 12:19
p = 216.1 kPa
p1 = 216.3 kPa
T = 120.0 °C

Hardwarové požadavky

- Operační systém Windows 98 a vyšší
- IBM – kompatibilní PC (Pentium II 350 a vyšší)
- Volný sériový port RS-232 (v případě připojení jednoho přístroje)
- Volný PCI slot (v případě připojení více přístrojů)
- Systémová paměť alespoň min. 32 MB RAM
- Monitor min. 15"
- CD-ROM
- Rozlišení opt. 1024x768
- Síťová karta (v případě připojení do LAN)

Johnson & Johnson s.r.o.

Johnson & Johnson, s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5
tel.: 227 012 222, fax: 227 012 147
e-mail: info@jnycz.jnj.com, www.jnycz.cz



BMT Medical Technology s.r.o.
Cejl 50, 656 60 Brno
tel.: 545 537 111
fax: 545 211 750
e-mail: mail@bmt.cz, www.bmt.cz



Miele, spol. s r.o.
Hněvkovského 81 b, 617 00 Brno
tel.: 543 553 111,
fax: 543 553 149
e-mail: info@miele.cz, www.miele.cz